

FLÄCHENDESINFEKTIONS- UND SCHUTZMITTEL

NACHWEISE

Das Desinfektionsmittel Sterilyte FL X ist als Biozidprodukt bei der BAuA unter folgender Registrierungsnummer zu finden: **N-98295**.

UFI: H4K0-Y0E8-V00U-DDD

WIRKSTOFF

Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor (CAS: 7681-52-9).

Entspricht ca. 1,2 g/kg

PRODUKTDATEN

PH-Wert: 8,5 -9,2

Farbe: Farblos

Aggregatzustand: Flüssig

Geruch: Chlorig

GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE



Entfallen

VERKAUFSEINHEITEN

- 250ml Sprühflasche
- 500ml Sprühflasche
- 1000ml Flasche
- 5L Kanister
- 20L Kanister
- 1000L IBC Tank

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Losen Schmutz entfernen oder bei Bedarf mit einem Reinigungsmittel vorreinigen.
2. Anwendungslösung unverändert anwenden. Auf die zu desinfizierende Oberfläche ca. 50ml/m² aufbringen und diese vollständig benetzen.
3. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten. Empfohlen wird eine Einwirkzeit von 15 Minuten. Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle.
4. Bei Bedarf mit sauberem Wasser abspülen oder feucht nachwischen.

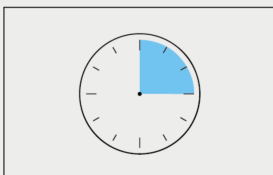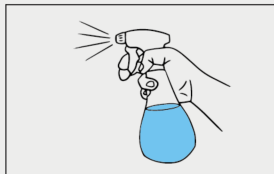

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKT- INFORMATIONEN LESEN.



Auch zu Desinfektion von Verfahrenswasser in Luftbefeuchtern, Kühlsystemen und Klimaanlage geeignet:

Anwendung: 5 bis 10 ml Desinfektionsmittel pro Liter Wasser hinzufügen. Desinfektion Täglich bis Wöchentlich wiederholen und das Wasser regelmäßig austauschen.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung des Geräteherstellers beachten und auf Verträglichkeit prüfen.

KUNDENHINWEISE

- Das Gemisch ist nicht zum Trinken geeignet.
- Bei Verwendung von Metallegierungen Korrosionsprüfung durchführen. Dosierpumpen von Spendern einer Korrosionsprüfung unterziehen.
- Eine Verfärbung von Textilien kann beim Einsatz von Sterilyte FL X nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Bitte testen Sie vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbbechtheit und Materialverträglichkeit, insbesondere bei Marmor, Naturstein oder Leder.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffe in das Produkt einzutragen.
- Sterilyte FL X darf nicht mit Säuren gemischt werden. Bitte beachten Sie die Informationen zum Verfallsdatum auf dem Etikett.
- Sterilyte FL X zerfällt nach der Desinfektion in Wasser und Salz.

LAGERBEDINGUNGEN

- Geöffnete Gebinde innerhalb von 8 Wochen verbrauchen.
- Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Behälter trocken halten.
- Nur im Originalbehälter zwischen 5 und 30 °C aufbewahren.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Behälter aufrecht lagern.

Einwirkzeiten und Wirksamkeit

EN 13697 (Bakterizid und Levurozid) Nach VAH Richtlinien	5 Minuten	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis
EN 14349 Veterinärhygiene (bakterizid)	10 Minuten	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans Proteus hauseri (vulgaris) Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 (Fungizid)	15 Minuten	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
EN 14476 (Viruzid) Anwendung im humanmedizinischen Bereich	1 Minute	murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus
EN 13704 (Sporizid)	20 Minuten	Bacillus subtilis
EN 13624 (Medizinischer Bereich)	5 Minuten	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
EN 13727 (Medizinischer Bereich)	5 Minuten	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas



HANDESDESINFEKTIONSMITTEL

NACHWEISE

Das Desinfektionsmittel Sterilyte HD Deluxe ist als Biozidprodukt bei der BAuA unter folgender Registrierungsnummer zu finden: N-97245.

UFI: 78C0-G06H-D008-G2ST

WIRKSTOFF

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)). Entspricht ca. 7,5g/kg

PRODUKTDATEN

PH-Wert: 7–8

Farbe: Farblos

Aggregatzustand: Flüssig

Geruch: mild

GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE

– Entfallen

VERKAUFSEINHEITEN

- 100ml Sprühflasche
- 500ml Euronorm Flasche
- 1L Flasche
- 5L Kanister
- 20L Kanister
- 1000L IBC Tank

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hände mit ca. 3ml Lösung 30 Sekunden lang einreiben und feucht halten. Für die hygienische Händedesinfektion nach EN1500 muss der Vorgang im Anschluss direkt wiederholt werden (2x 30 Sekunden).

Bei Verschmutzung Hände vor der Desinfektion reinigen.

**BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG
VERWENDEN. VOR GEBRAUCH
STETS ETIKETT UND PRODUKT-
INFORMATIONEN LESEN.**



KUNDENHINWEISE

- Das Gemisch ist nicht zum Trinken geeignet.
- Bei Verwendung von Metalllegierungen Korrosionsprüfung durchführen. Dosierpumpen von Spendern einer Korrosionsprüfung unterziehen.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffe in das Produkt einzutragen.
- Das Produkt Sterilyte HD Deluxe darf nicht mit Säuren gemischt werden. Bitte beachten Sie die Informationen zum Verfallsdatum auf dem Etikett.

LAGERBEDINGUNGEN

- Geöffnete Gebinde innerhalb von 8 Wochen verbrauchen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Behälter trocken halten.
Nur im Originalbehälter zwischen 5 und 30 °C
- aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Behälter aufrecht lagern.
- Vor Frost schützen.

WIRKSAMKEIT

- Für die Hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 (60 Sekunden) geprüft.
- Geprüft nach EN 1276
- Geprüft nach EN14476 (begrenzt viruzid, auch wirksam gegen Sars-Cov-2/Covid-19-Viren in 60 Sekunden.)